


エクセレントメドマー使用上のご注意

器具機械 (77) バイブレータ
管理医療機器
家庭用エアマッサージ器
(34663000)

型式 EXM-12000

ブーツ装着時のご注意

ブーツを装着するときは、ファスナーが直接脚に触れないように、ファスナーの裏側に付いているファスナーカバーを脚の上にかぶせてから、ファスナーを締めてください。

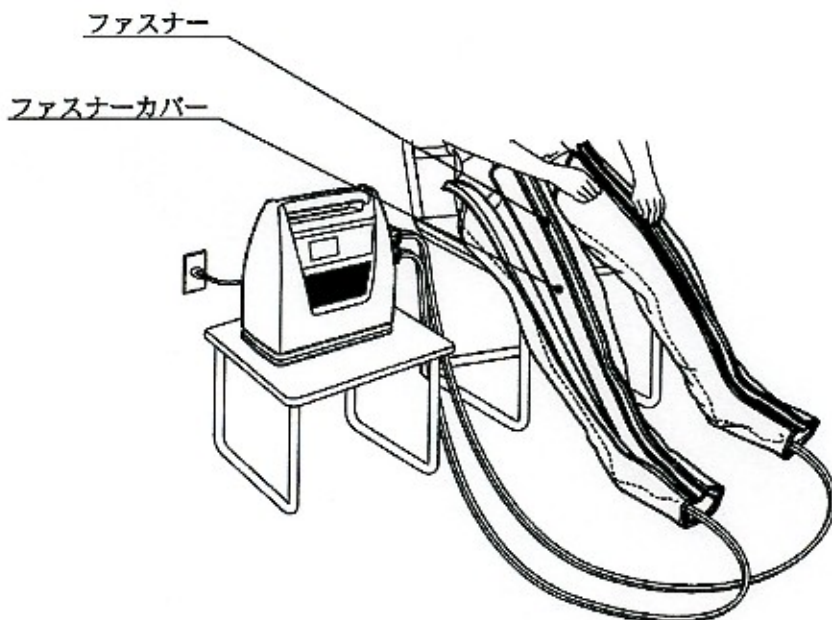

運転中の設定変更時のご注意

残り時間の表示が0分になると、モード、圧力および気室7-8入切の設定変更はできません。

本紙は、必要なときに読めるよう、必ず取扱説明書と一緒に大切に保管してください。



LQ05769-0