

家庭用エアマッサージ器


ハイパーメドマー

使用前に必ずこの取扱説明書と別途添付の保証書を読んでください。

この取扱説明書は必要なときに読めるよう、大切に保管してください。

医療用具製造許可番号

09BZ5009

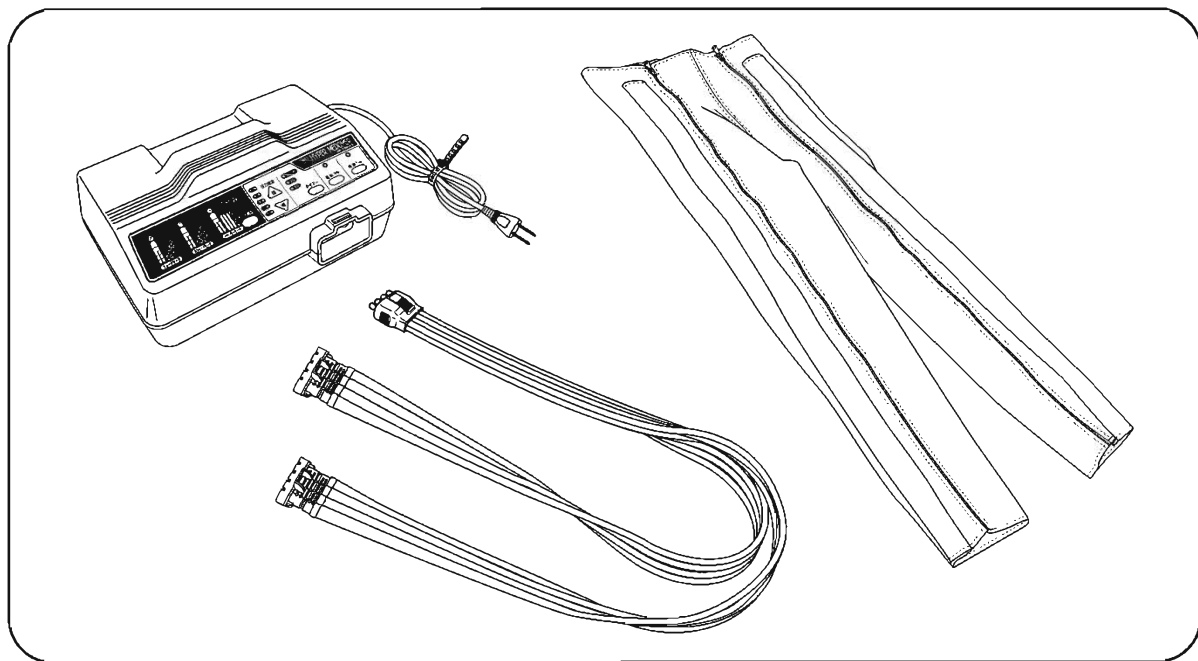



目次

表示マークの意味	1
使用上の注意	1~3
効能・効果	3
本機の特徴	3
各部の名称	4
使用の手順	5~8
お手入と保管	8
定期点検のお願い	9
故障と思ったとき	9
仕様	10
別売品のご案内	10
保証・サービスについて	10




表示マークの意味



この取扱説明書に表示してあるマークの意味を十分に理解の上、本文を読んでください。

(1) 危害・損害の程度

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。
 注意	この表示を無視して、誤った使用をすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される場合。



(2) 絵表示

禁		禁止を表します
		水場での使用禁止を表します
止		分解禁止を表します


強制		必ずしていただきたいことを表します
		電源プラグを電源コンセントから抜けを表します

使用上の注意











警告

- 次の人は、本機の使用を禁止します。 
 1. 発症後6ヶ月以内の下肢深部静脈血栓症を患っているか、もしくはその恐れのある場合。
※「下肢深部静脈血栓症」とは、下肢全体または膝より下が腫れ上がって痛みがあり、立ったり歩いたりすると痛みが強くなる自覚症状のあることをいいます。
 2. 装着部におでき、やけど、虫さされなどの急性炎症や化膿性疾患がある場合。
 3. 医師が使用を不適当と認めた場合。
- 本機の改造、分解、修理は絶対にしないでください。事故の原因になります。 



注意

- 次の人は必ず医師と相談のうえ使用してください。症状や病因によっては使用に適さない場合があります。 
 1. 心臓に障害のある人
 2. 糖尿病の人
 3. 骨粗しょう症の人
 4. 装着部に疾患から生じるむくみや疼痛のある人
 5. 装着部に骨折、脱きゅう、肉ばなれ、ねんざ、外傷のある人
 6. 悪性腫瘍のある人
 7. 高血圧症と診断されている人
 8. 妊娠している人
 9. 安静を必要とする人
 10. 特に身体に異常を感じている人
 11. 熱の高い人
 12. 皮膚の弱い人
 13. 上記以外の疾患で医師の治療を受けている人
 14. 自覚症状の意思表示ができない人
 15. 本機の使用によりかえって疼痛の増す人
 16. 本機を使用しても症状の改善が見られない人















(1) 使用中の注意

- 子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところで使用しないでください。事故につながる可能性があります。 
- 身体に異常を感じたときは、直ちに使用を中止し、医師と相談してください。使用を続けた場合、身体に悪影響を及ぼす原因になります。 
- 他の治療器と同時に使用しないでください。本機の効果が十分発揮できないばかりか、身体に悪影響を及ぼす原因になります。 
- 30分を超えての使用はしないでください。筋肉に対して必要以上の刺激となります。また、次の使用までには少なくとも3時間以上の間隔をあけてください。 
- 通常、圧力設定は「3」以下で使用してください。特にお肌の弱い方は、圧迫痕が残ることがあります。 
- 高齢者の方はハイパーモードで使用しないでください。また、圧力設定は「3」以下で使用してください。事故につながる可能性があります。 
- 本体は使用中、操作できる所に置いてください。事故につながる可能性があります。 
- 自分で、意思表示できない人に使わせしないでください。事故につながる可能性があります。 
- 使用中に立ち上がったたり、歩いたりしないでください。事故につながる可能性があります。 
- 使用前に必ず圧力設定を「1」に設定してください。事故につながる可能性があります。 

(2) 使用場所についての注意

- ストープなどの火気の近くで使用しないでください。火災・故障の原因になります。 
- 浴室など湿気が多い場所で使用しないでください。故障・感電・火災の原因になります。 

(3) 本体についての注意

- 電源プラグは商用AC100V電源コンセントにつないで使用してください。AC100V以外で使用すると正しく作動しなかったり、火災や感電の原因になります。 
- むれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電の原因になります。 
- テーブルタップなどを使用した「タコ足配線」をしないでください。電源プラグや電源コードが熱くなり、火災や故障の原因になります。 
- 本体に水などをかけないでください。感電や故障の原因になります。 
- 使用中に停電した場合は、直ちに電源プラグを電源コンセントから抜き、エアープラグをエアーソケットから抜いてください。事故につながる可能性があります。 
- 本体に衝撃を与えないように、落としたり、倒したり、蹴ったりしないでください。故障の原因になります。 
- 本体にはタオルや布地等を被せないでください。本体が過熱し、火災や感電の原因になります。 
- 本体の上に物を載せないでください。本体が過熱し、故障の原因になります。また、振動の原因になります。 
- 本体を倒したり、傾けた状態で使用しないでください。故障の原因になります。 
- 踏み台にしたり、上に載ったりしないでください。事故につながる可能性があります。 
- 本機に異常（発煙、手でさわれないほど熱い、音が急に大きくなった等）を感じたときは、直ちに使用を中止し電源プラグを電源コンセントから抜いてください。その後、お求めの販売店に連絡してください。使用を続けた場合、火災や感電の原因になります。 
- 電源プラグを電源コンセントから抜く場合は、電源コードを持って引き抜かないでください。また、電源コードを無理に曲げたり、重いものを載せないでください。電源コードが断線し、火災や感電の原因になります。 
- 使用後は、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。事故につながる可能性があります。 
- 本体を保管するときは、電源コードを本体にまかないでください。電源コードの接続部が断線し、火災や感電の原因になります。 

(4) ホース及びパンツについての注意

- ホースは折り曲げたり、重い物を載せたりした状態で保管しないでください。折れや潰れ癖がつくと、加圧・除圧が正常に行われず危険です。
- パンツは決められた部位に装着してください。正しい部位に装着されていない場合、身体に悪影響を及ぼしたり、事故の原因になります。
- 針や刃物でホースやパンツに傷を付けしないでください。事故や故障の原因になります。
- パンツを装着するときは、ズボンのポケットなどに物が入っていないことを確かめてください。脚をけがしたり、パンツの破損の原因になります。
- ホースは折れたり潰れたりした状態で使用しないでください。加圧・除圧が正常に行われず危険です。
- 使用中にパンツのファスナーが開く場合は、ファスナーの破損です。皮膚、ストッキング、ズボン等をはさむ恐れがありますので、すぐに使用を中止してください。




効能・効果

1. 末梢静脈やリンパ循環の主な原動力は、上下肢の筋肉群で、この筋肉の収縮によるポンプ作用と弁機構が密接に関連して循環が行われます。本機は空気室に加圧、除圧を繰り返すことにより、筋肉の収縮・弛緩の場合と同じような作用をして、リンパ液と静脈血の環流を促進します。
2. 効能・効果
 - ・ 血行促進
 - ・ 疲労回復
 - ・ 筋肉の疲れ、こりをほぐす

本機の特徴

- ソフトな空気圧によるマッサージなので、局所的な痛みや電気的な刺激がなく、足先から太ももまでまんべんなくもみ上げます。
- パンツはカフが重なり合っているため、もみむらがなく効果的なマッサージができます。
- マッサージのパターンは3種類から選択できます。
- マッサージの強さは5段階に設定できます。また、マイコンで制御しているので足の太さに関係なく強さは一定です。
- 使用時間はタイマーで3段階に設定できます。
- ホースの着脱はワンタッチ方式なため容易です。
- 本体は小型・軽量・低騒音なため、持ち運び、設置場所に困りません。


各部の名称

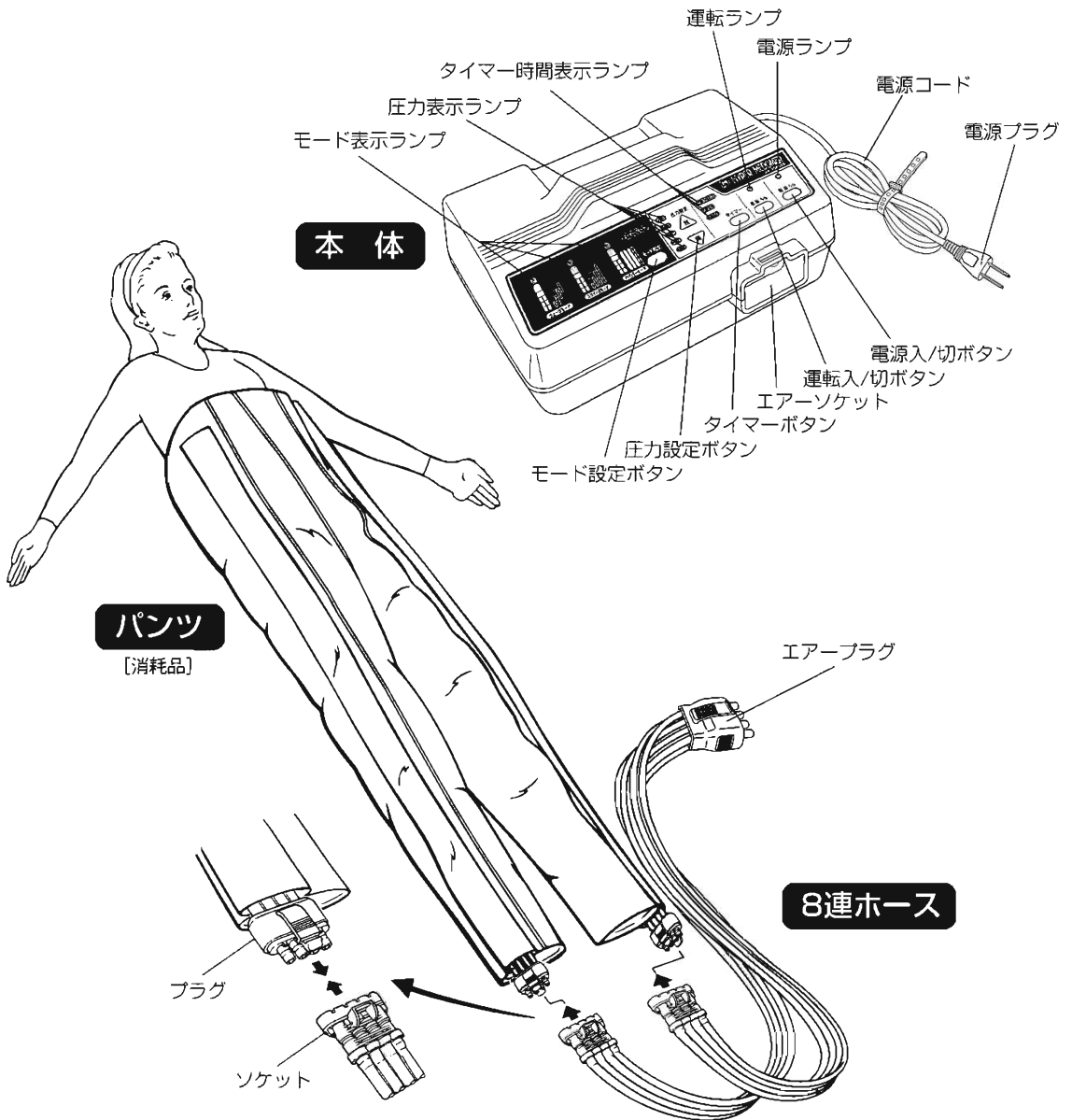

⚠ 注意

ホースのプラグ及びソケットは決められた方向に接続すること

方向違いで接続すると、正しい加圧順序にならず、血行を妨げ、身体に悪影響を及ぼす原因になります。

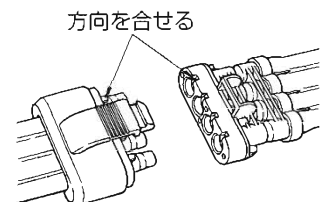

使用の手順

⚠ 注意

- 本体作動時はホース先を目や耳に向けないでください。ホース先から出る圧縮空気により、目や耳に障害を負う可能性があります。
- 使用中に立ち上がったり、歩いたりしないでください。事故につながる可能性があります。
- パンツを装着するときは、ズボンのポケットなどに物が入っていないことを確かめてください。脚をけがしたり、パンツの破損の原因になります。
- パンツは、決められた部位に装着してください。正しい部位に装着されていない場合、身体に悪影響を及ぼしたり、事故の原因になります。
- 使用中にパンツのファスナーが開く場合は、パンツの破損です。皮膚、ストッキング、ズボン等をはさむ恐れがありますので、すぐに使用を中止してください。
- 使用前に必ず圧力設定を「1」に設定してください。事故につながる可能性があります。
- 使用後は、必ず電源プラグを電源コンセントから抜いてください。事故につながる可能性があります。
- 30分を超えての使用はしないでください。筋肉に対して必要以上の刺激となります。また、次の使用までには少なくとも3時間以上の間隔をあげてください。
- 通常は、圧力設定は「3」以下で使用してください。特にお肌の弱い方は、圧力痕が残ることがあります。
- 本体は使用中、操作できる所に置いてください。事故につながる可能性があります。




初めて使用する場合、またはしばらく使用しなかった場合は、本機が正常に作動することを、「使用の手順」に従って確認してください。特に次のことを注意して確認してください。

1. 運転入/切ボタンで「運転」、「停止」を確実に行うことができますか。
2. 加圧・除圧が正しい順番で行われていますか。
3. タイマーの設定時間で停止しますか。
4. 圧力設定ボタンで圧力の変更は正しく行われていますか。

1


電源プラグを電源コンセントAC100Vに差し込みます。

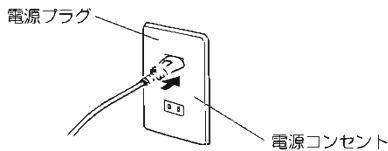

2

パンツのプラグに、8連ホースのソケットを接続します。


注) 片足だけで使用する場合は、使用する方のプラグのみを8連ホースに接続してください。

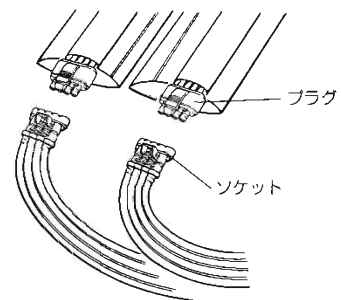

- プラグの凸とソケットの凹を合わせ「カチッ」と音がするまで差し込みます。


3

8連ホースのエアープラグを本体のエアースOCKETに差し込みます。エアープラグのツメが「カチッ」という音で奥に差し込みます。

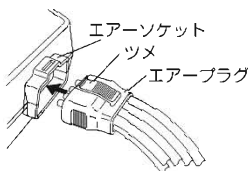


4

パンツを装着します。

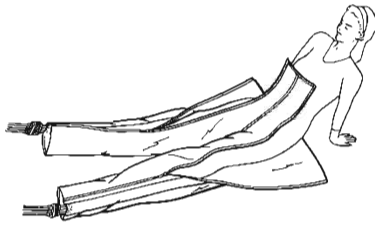

- パンツはファスナーをひざ下くらいまで下げ寝ながら装着します。股下は身体に密着するように引き上げてください。
- ファスナーは最後まできちんと締めてください。


Lサイズベルト

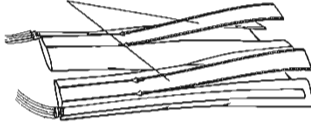

注) パンツのサイズが小さい場合は、別売のLサイズベルトY-80A(巾75mm)もあります。

5

これで準備完了です。
横になるなど楽な姿勢で行ってください。

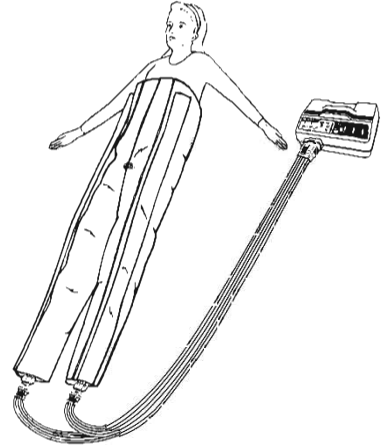


⚠ 注意

- 本体は使用中、操作できる所に置いてください。事故につながる場合があります。
- ホースは折れたり潰れたりした状態で使用しないでください。加圧・除圧が正常に行われず危険です。

6

電源を入れます。
電源入/切ボタンを押すと、電源ランプが点灯します。

※電源を「切」から「入」にしたとき、モード設定は「ウェーブモード」、
圧力設定は「1」、タイマーは「10分」の状態です。

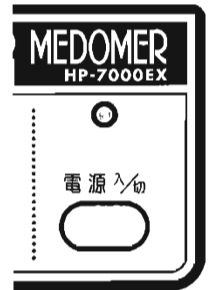



7

運転入/切ボタンを押して、運転・停止ができるかの作動テストを行います。

次に加圧・除圧の順番を確認します。

1サイクル目は予圧です。全気室に給気され排気します。(モード表示ランプは点滅)
2サイクル目からウェーブモードに入ります。(モード表示ランプは点灯)
足先→ふくらはぎ→太もも→腰→足先の順番で加圧・除圧が繰り返されるかの確認を行ってください。
完了したら運転入/切ボタンを押して停止させます。



1サイクル目(予圧) 2サイクル目以降

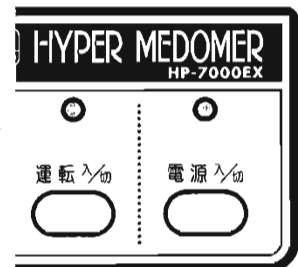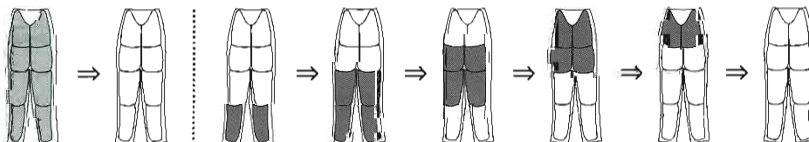

8

モード、圧力、タイマーを設定します。

モードはウェーブ、スクイーズ、ハイパーの3種類があります。モード設定ボタンを押すごとにモードが切り換わり、モード表示ランプで表示されます。運転中モードの変更を行った場合、排気を行った後(このとき運転ランプが点滅します)、次の運転を開始します。この場合、予圧はありません。

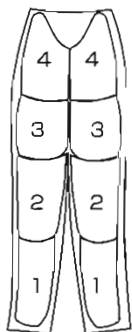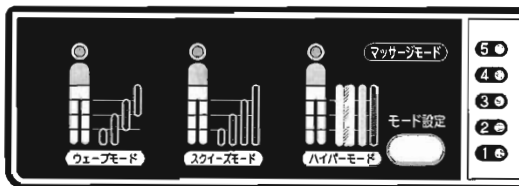

パンツの気室番号


ウェーブ・・・足先から部分的に加圧します。

1サイクル目(予圧) 2サイクル目以降




スクイーズ・・・足先から順番に加圧し、全室一気に除圧します。

1サイクル目(予圧) 2サイクル目以降

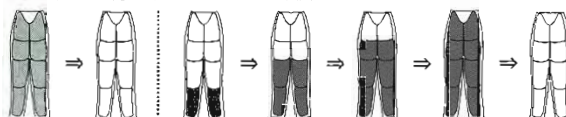

ハイパー・・・全室一気に加圧し、全室一気に除圧します。

1サイクル目(予圧) 2サイクル目以降

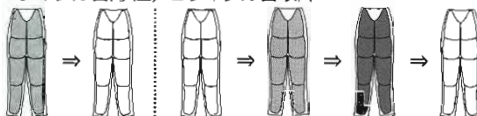

圧力は5段階から設定します。圧力設定ボタン を押すと強くなる方向に、 を押すと弱くなる方向に圧力が切り換わり、圧力表示ランプで表示されます。(ランプは圧力「1」～「3」が緑色、「4」「5」が赤色となっています。) また、圧力設定を「4」「5」に上げる場合は、それぞれ、 を1秒以上長く押し続けます。運転中に圧力設定の変更を行った場合、排気を行った後(このとき運転ランプが点滅します)、運転が再開されます。


⚠ 注意

- 使用前に必ず圧力設定を「1」に設定してください。事故につながる恐れがあります。
- 通常、圧力設定は「3」以下で使用してください。特にお肌の弱い方は、圧迫痕が残ることがあります。
- 高齢者の方は、ハイパーモードで使用しないでください。また、圧力設定は「3」以下で使用してください。事故につながる可能性があります。



圧力表示ランプ	1	2	3	4	5
気室圧kPa (mmHg)	4.0 (30)	6.0 (45)	8.0 (60)	10.0 (75)	12.0 (90)

注) 上記圧力は1.3kPa以上のバラツキがあります。

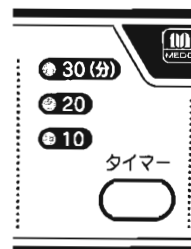

- タイマー時間は10分、20分、30分から選択します。タイマーボタンを押すごとに10分→20分→30分→10分の順番で切り換わり、タイマー時間表示ランプで表示されます。但し、運転中は操作できません。


9

運転を開始します。

運転入/切ボタンを押すと、運転ランプが点灯し、運転が開始されます。

※安全対策のため、加圧中や排氣中にヒザを曲げたり、気室を押えたりすると本体が停止する場合があります。(電源ランプが点滅しブザー音が発生する)
この場合は電源を入れる所から始めてください。

途中で停止したいときは、運転入/切ボタンを押してください。タイマーの設定時間終了後は、ブザーでお知らせします。また、設定時間終了3分前になると、タイマーが点滅してお知らせします。

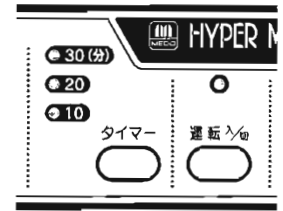

⚠ 注意

身体に異常を感じたときは、直ちに使用を中止し、医師と相談してください。使用を続けた場合、身体に悪影響を及ぼす原因になります。


10

終了したら、空気がよく抜けてから、パンツを脱いでください。

まず、パンツのプラグを8連ホースのソケットから抜いてください。


- 図のようにプラグの上下のツメを押しながらソケットを抜いてください。

次にエアースOCKETからエアープラグを抜くときは、エアープラグのツメを押しながら抜いてください。

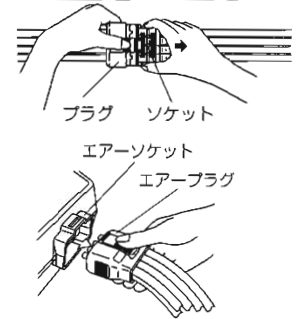

11

使用後は電源を切り（電源ランプが消灯します）、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

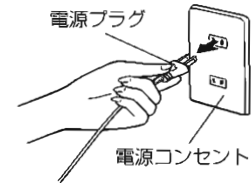

⚠ 注意

電源プラグを電源コンセントから抜く場合は、電源コードを引張らず電源プラグを持って引き抜いてください。

お手入れと保管

⚠ 注意


- お手入れの際は、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。感電の原因になります。

お手入れ


- 本体、ソケット、プラグ、ホースの汚れは、ぬるま湯か中性洗剤を含ませよくしぼった布で拭いてください。
※水洗い、ベンジン、シンナー等は絶対に使用しないでください。
- パンツの汚れは蒸しタオルで軽く拭き、内側を表にして風通しのよい所で陰干ししてください。

保管


- 各部の汚れをとった後、直射日光の当たる場所や湿気の高い場所を避けて保管してください。また、パンツ及び8連ホースは、ホースが折れないように伸ばした状態か、ゆるく巻いた状態で保管してください。

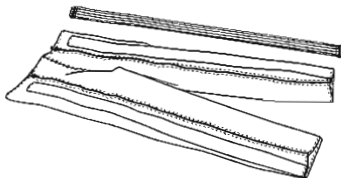

伸ばした状態

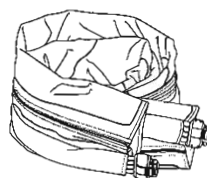

ゆるく巻いた状態

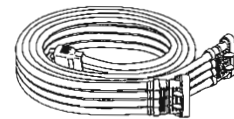

定期点検のお願い

次のような症状がないか点検してください。

- 電源入/切ボタンを押してもとまどき操作できないことがある。
- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 動作中に異常な音・振動がある。
- 本体が変形したり、こげくさいにおいがする。
- 電源コードを動かすと、停止する場合がある。





このような症状のときは、直ちに使用を停止し、お求めの販売店に点検・修理を依頼してください。

故障と思ったとき

⚠ 注意

●本機の改造、分解、修理は、絶対にしないでください。事故の原因になります。



状 態	原 因	処 置
本体を操作できない	電源プラグが電源コンセントから抜けていませんか。	電源プラグを電源コンセントに差し込みます。
	電源入/切ボタンを押しましたか。	電源入/切ボタンを押します。
パンツが加圧されない	運転入/切ボタンを押しましたか。	運転入/切ボタンを押します。
	各ホースの接続プラグ、ソケットが抜けていませんか。	各ホースの接続プラグをソケットに差し込みます。
	ホースが折れていたり、重い物が載っていませんか。	折れをなくし、重い物を取り除きます。
	パンツやホースに穴があいていませんか。	新しい物を購入してください。
	パンツからホース差込口が抜けていませんか。	ホース差込口をパンツに差し込みます。
設定したモードや圧力で運転しない (モード表示ランプが点滅している)	予圧を行っています。 1サイクル目は予圧です。全気室に給気され排気します。 2サイクル目から設定したモードに入ります。	異常ではありません。 2サイクル目から設定されたモードや圧力で運転されます。
パンツが順番通りに加圧されない	各ホースの接続プラグ、ソケットが正しい方向に接続されていますか。	接続プラグとソケットを正しい方向で接続します。
圧力設定が「3」よりも上に上がらない	圧力設定ボタン  を1秒以上押していますか。	圧力設定ボタン  を1秒以上押します。
運転中に本体が停止する (電源ランプが点滅しブザー音が発生する)	加圧中や排気中にヒザを曲げたり、気室を押えたりすると、気室内の圧力が上昇し安全装置が作動します。	加圧中や排気中に無理に体を動かしたり、気室を押えたりしないでください。電源を入れる所から始めてください。
	パンツやホースに穴があいていませんか。	新しい物を購入してください。
	パンツからホース差込口が抜けていませんか。	ホース差込口をパンツに差し込みます。
	本体内部異常	電源プラグを電源コンセントから抜き初めから操作してください。それでも同じ状態であれば、すぐに電源プラグを電源コンセントから抜き、お求めの販売店に点検修理を依頼してください。
運転中、本体の音が変わる	マイコンでポンプの圧力を制御しているためです。	異常ではありません。
運転中、モード切替や圧力設定を行うと排気状態になる	安全対策のため排気状態にしています。	異常ではありません。
給気の気室が変わるとき排気のような音や圧力降下がある	気室が連結されるためです。	異常ではありません。



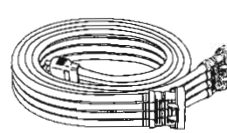
上表の点検後もなお異常がある場合には、直ちに使用を中止し、お求めの販売店に点検・修理を依頼してください。

仕 様

電源電圧(V)	AC100	空気圧設定範囲 (kPa)	4.0~12.0
電源周波数(Hz)	50/60	(mmHg)	30~90
消費電力(W) (待機中)	24/22 (3/3)	定格時間(分)	30
もみ上げサイクル(秒) (圧力設定「3」の参考)	ウェーブモード 約120 スクイーズモード 約 85 ハイパーモード 約 50	質量(重量)(kg)	本体 4.8 パンツ 2.3 ホース 0.85
タイマー設定時間(分)	10. 20. 30	寸法 (mm)	本 体 315(幅)×222(奥行)×155(高さ) ホース 1,600 パンツ 股 下 970 股 上 430 ウエスト 1,100 太もも周囲 600 裾周囲 600 ズボン丈 1,400

※もみ上げサイクルは、圧力設定が高くなるに従い長くなり、また体型によっても変わります。

別売品のご案内
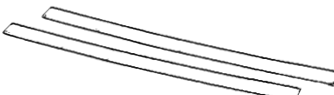
<p>Y-80A (Lサイズベルト) 【消耗品】</p> 	<p>P-80A (パンツ) 【消耗品】</p> 	<p>H-80A (8連ホース)</p> 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

保証・サービスについて

製品に添付されている保証書は、大切に保管してください。保証書についている保証登録カードは表裏の所定欄に、必ずご記入のうえ、至急お送りください。当社の保証登録台帳に登録されます。保証期間はお買い上げの日から1年間。「正常な使用状態」で万一故障が起きた場合には、無料で修理させていただきます。(但し、消耗品は除きます。)

※パンツは消耗品ですので保証の保証外となります。

〈お客様ご相談窓口〉メドー産業株式会社

☎03-3447-5521

受付時間 AM9:00~PM5:00 (月~金)

発売元  **メドー産業株式会社**

本 社 〒141-0022 東京都品川区東五反田1-11-15 (電波ビル) TEL.03 (3447) 5521 (代表) FAX.03 (3447) 3570
大阪支店 〒537-0001 大阪市東成区深江北2-10-10 TEL.06 (6976) 3271 (代表) FAX.06 (6976) 3841

製造元  **栃木日東工器株式会社**

〒329-1311 栃木県塩谷郡氏家町大字氏家3473-2 TEL.028 (682) 8851 (代表) FAX.028 (681) 7038

クアイデンキ



LQ05376-1